



Raab Gesunde Schuhe

Ravenéstr. 35 a | 56812 Cochem

Tel. 02671 917901

Fax. 02671 917902

E-Mail: raab@gesunde-schuhe.com

www.raab.gesunde-schuhe.com

Gebrauchshinweise

Liebe Kundin, Lieber Kunde

heute haben Sie die speziell für Sie angefertigten Einlagen erhalten. Damit Sie beschwerdefrei gehen können, beachten Sie bitte dringend die nachfolgenden Gebrauchshinweise:

- Vertauschen Sie nicht ihre Einlagen in den Schuhen (Achten Sie auf die R und L Kennzeichnung)
- Um einen therapeutisch wirkungsvollen Zweck zu erreichen, sollten Sie die Einlagen sowohl im Haus, als auch in der Freizeit tragen.
- Kontrollieren sie nach dem ersten Tragen Ihre Füße auf Rötungen oder auf Druckstellen!
Tragezeiten: 1. Tag 2 – 3 Stunden, ab dem 2. Tag Steigern. Nach einer Tragezeit von einer Woche sollte man die Einlagen den ganzen Tag beschwerdefrei tragen können.
- Die Einlagen wurden von uns mit sorgfältig nach Ihren Maßen gefertigt. Bei eventuellen Beschwerden wenden Sie sich sofort an uns.
- Lassen Sie die Einlagen zu den angegebenen Terminen kostenlos kontrollieren, damit die Einlagen die optimale Wirkung von Stützung Effekt und Entlastung behalten.
- Bei Kindern unbedingt auf das Wachstum achten, denn eine zu kleine Einlage kann zu großen Schädigungen führen.
- Legen Sie die Einlagen nur in dafür Geeignete Schuhe. Die Schuhe, in denen Sie Ihre Einlagen tragen, sollten ausreichend Platz bieten, an der Ferse hoch genug sein und eine loses Fußbett haben.
- Einlagen, die in Arbeitsschuhen getragen werden, müssen antistatisch gefertigt sein.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.
- Der optimale Schuh ist ausschlaggebend für die Passform Ihrer Einlagen.
- Trocknen Sie die Einlagen nie an der Heizung oder in der Nähe anderer Wärmequellen.

Wir bieten eine große Auswahl an modischen und bequemen Schuhen.