



Raab Gesunde Schuhe

Ravenéstr. 35 a | 56812 Cochem

Тел. 02671 917901

Факс 02671 917902

Электронная почта

raab@gesunde-schuhe.com

<https://raab.gesunde-schuhe.com>

Инструкции по применению

Уважаемая клиентка, уважаемый клиент

Сегодня вы получили специально для вас изготовленные стельки. Чтобы ходить без болей, пожалуйста, внимательно следуйте приведённым ниже инструкциям по применению.

- Пожалуйста, обратите внимание на правую (R) и левую (L) маркировку на стельках.
- В рамках терапевтического лечения рекомендуется носить стельки как дома, так и на работе.
- Контролируйте ноги после первого использования, следите за покраснением или мозолями! Время ношения: 1-й день 2-3 часа, начиная со 2-го дня увеличивайте. После 1 недели ношения стельки должны быть комфортны для ношения в течение всего дня.
- Стельки были изготовлены нами с особой тщательностью. В случае каких-либо повреждений или неудобств сразу свяжитесь с нами.
- Пройдите бесплатный контроль стелек в указанные сроки, так как только при их правильном использовании можно обеспечить оптимальный эффект стабилизации и разгрузки.
- При заказе обязательно обратите внимание на размер, так как слишком большая стелька может привести к повреждениям.
- Используйте стельки только в специально предназначенной для этого обуви. Обувь, в которой вы носите стельки, должна обеспечивать достаточное пространство, быть достаточно высокой в области пятки и иметь хорошую стельку.
- Стельки, предназначенные для ношения в рабочей обуви, должны быть антистатическими (при возникновении вопросов обратитесь к нам).
- Важно, чтобы обувь соответствовала для правильной посадки стелек.
- Никогда не сушите стельки на батарее или рядом с другими источниками тепла.
- Мы предлагаем широкий ассортимент модной и удобной обуви.